

PLASTOSPRAY®

Spray plastic pentru pansarea rănilor

COMPOZIȚIE

Copolimer acrilic 4,00%
Acetat de etil 42,98%
Bisulfură de tetrametiltiuram 0,02%
Agent de propulsare (DME) 53,00%

Conținut net: 58 g (75 ml) sau 196 g (250 ml)

INDICAȚII PENTRU UTILIZARE

Plastospray®, spray plastic pentru pansarea rănilor, acționează prin formarea unui film (unei pelicule) transparent, elastic, subțire și adeziv, permeabil la aburi și la umiditate. Se utilizează în dermatologie, arsuri superficiale, uz postoperator, pediatrie, ca o completare la pansamentele convenționale, răni superficiale, puncții, vaccinări și fistule.

MOD DE UTILIZARE

Se agită înainte de utilizare. Se pulverizează deasupra zonei dorite, de la o distanță de 15-20 cm. Pentru rezultate mai bune, se va aplica în mod repetat, după uscarea primului strat. La câteva zile de la pulverizare, pelicula poate fi desprinsă începând de la margini, pentru a fi îndepărtată. Pentru a o îndepărta mai ușor, se poate folosi acetonă, eter sau acetat de etil.

PRECAUȚII

Recipient sub presiune. A se feri de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi de peste 50°C. A nu se găuri sau arde, chiar și după utilizare. A nu se pulveriza deasupra focului sau deasupra materialelor incandescente. A se feri de sursele de foc. Nu fumați când pulverizați Plastospray®. A se utiliza numai în locuri bine ventilate. Nu inspirați vapori. Evitați inhalarea directă a vaporilor. Respectați indicațiile de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Nu afectează stratul de ozon.

Foarte inflamabil.

Numai pentru uz extern.

PRODUCĂTOR

Laboratoarele Inibsa SA
Ctra. Sabadell a Granollers, km 14,5
08185 Lliçà de Vall, Barcelona
Spania

DISTRIBUITOR EXCLUSIV PENTRU ROMÂNIA

SC Actavis SRL
Bd. Ion Mihalache, nr. 11
cod 011171, sector 1, București
România